


Dermalogica PRO microneedling

Kosmetisches Microneedling
auf Medizin-Niveau

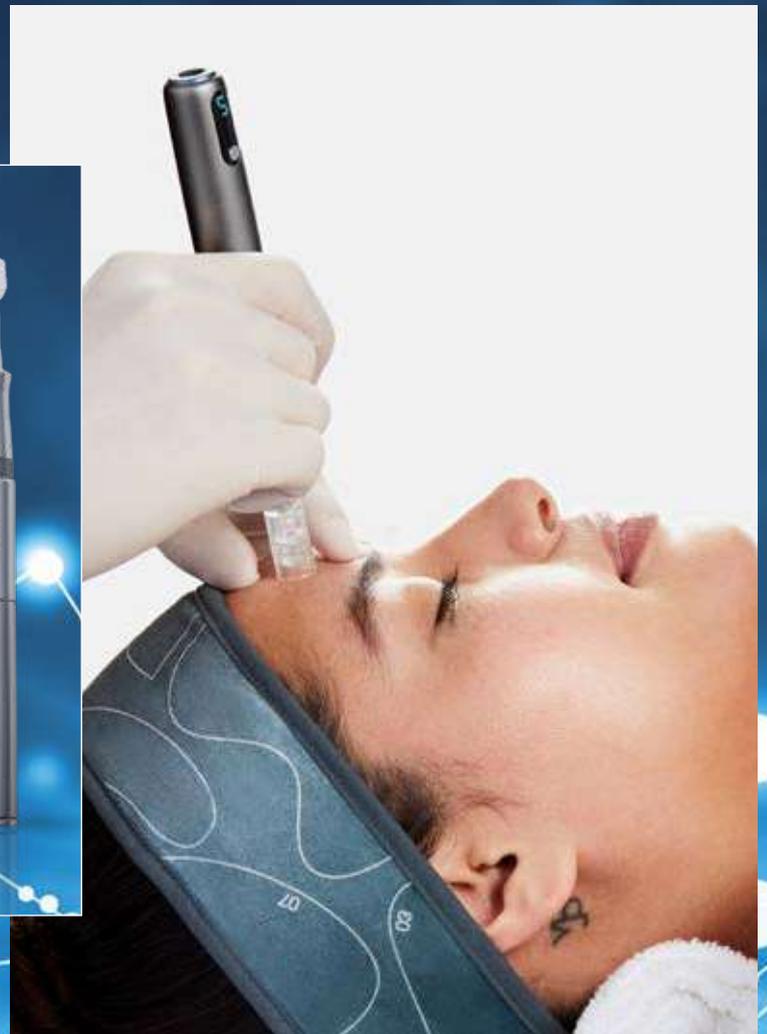


dermalogica PRO


Das Kundeninteresse an Microneedling ist so hoch wie noch nie

Microneedling hat in den letzten zehn Jahren rasch an Popularität gewonnen. Heute ist dieses minimal-invasive Verfahren eine der weltweit am häufigsten nachgefragten Treatments zur Behandlung von Hyperpigmentierung, Linien, Falten und unebener Hauttextur.

Endverbraucher in Deutschland suchen vermehrt im Internet nach Microneedling

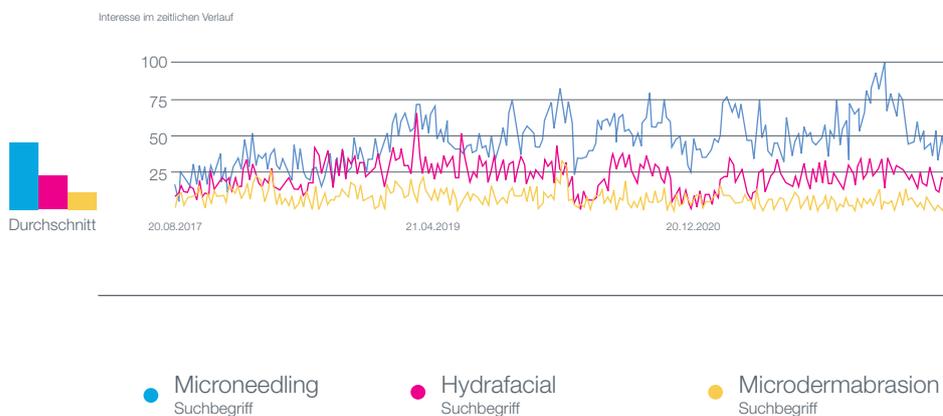

Immer mehr Forschungsergebnisse belegen die vielfältigen und effektiven Einsatzmöglichkeiten des Microneedling im Behandlungsraum. Jüngste Studien haben gezeigt, dass die Technik in der Lage ist, die Kollagenproduktion zu stimulieren und Melanozyten, die für die Überproduktion von Melanin und Hyperpigmentierung verantwortlich sind, wirksam zu regulieren.

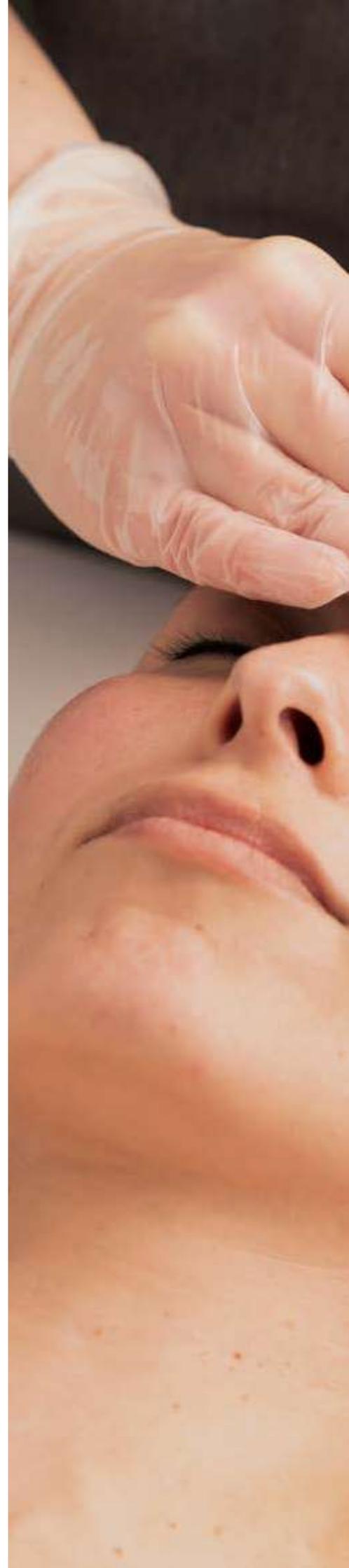



Wie funktioniert das Microneedling?

Microneedling ist ein minimal-invasives Verfahren, bei dem in der Haut durch die Verwendung feiner Nadeln winzige, gleichmäßig verteilte Mikroverletzungen erzeugt werden. Dabei werden die körpereigenen Wachstumsfaktoren angeregt. Die Hautzellen regenerieren sich und produzieren dabei neues Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure.

- + Anregung der körpereigenen Wachstumsfaktoren
- + Hautzellen regenerieren sich und produzieren neues Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure
- + Prallere und strahlendere Haut
- + Weniger feine Linien und Fältchen
- + Verfeinerung der Poren
- + Reduzierung von Pigmentflecken
- + Ebenmäßiger Teint

Sofort sichtbare Ergebnisse



vorher



nachher


Dermalogica setzt einen neuen Maßstab im Microneedling

Unser kosmetisches Microneedling-Konzept auf Medizin-Niveau hebt Ihre Behandlungen auf ein ganz neues Level. Dieses Konzept umfasst unser innovatives und hochwertiges Microneedling-Gerät, made in Germany, und unsere speziell entwickelte Microneedling-Behandlungsmethode.




- Patentierte Sicherheitsmembran
- Patentierte, kippbare Nadelplatte
- Nadeln aus chirurgischem Stahl oder Kunststoff von bester Qualität mit starker Durchdringungskraft

Perforation der Haut

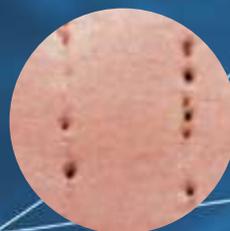

Herkömmliches Gerät

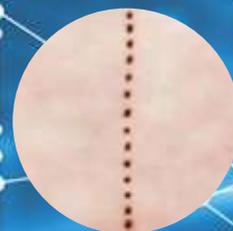

dermalogica

Vorteile des dermalogica Microneedling Gerätes

- + Exzellente Qualität, made in Germany
- + Absolute Präzision: sanft und leistungsstark (11 Frequenzen)
- + Ermöglicht zügiges Arbeiten
- + Die patentierte, kippbare Nadelplatte passt sich der Hautoberfläche an
- + Gleichmäßige zuverlässige Ergebnisse
- + Robustes, biokompatibles Material
- + Extrem leise, leicht, vibrationsarm, sicher und schmerzarm
- + Hervorragende Leistung



Die Dermalogica Microneedling-Technik

Die Dermalogica Microneedling-Technik ist eine einzigartige und präzise Technik, die entwickelt wurde, um die Behandlungsergebnisse zu verstärken.

Vorteile

- + **Komfortabel + gründlich:** Das Werkzeug wird methodisch bewegt.
- + **Einfach zu handhaben:** Unsere Methode ermöglicht eine flüssigere Arbeitsweise ohne Unterbrechungen aufgrund von Änderungen der Nadeltiefe und der Anwendungstechnik.
- + **Gesundheitliche Vorteile:** Der Lymphfluss wird angeregt und unterstützt den Körper beim Abtransport von Giftstoffen.
- + **Gleichmäßige + vollständige Behandlung:** Horizontale und vertikale Bewegungen gewährleisten beides.
- + **Anpassbar und flexibel:** Mit unserer Methode können Sie jede Microneedling-Behandlung durchführen.

In unserer Needling-Schulung erlernen Sie unsere einzigartige Needling-Technik und die Kombinationsmöglichkeiten mit unseren Dermalogica-Produkten.

Überzeugen Sie sich selbst von den sofort sichtbaren Resultaten und den nachhaltigen Hautverbesserungen. Ihre Kunden werden begeistert sein.

Für alle, die die höchsten Ansprüche an Technik, Effizienz und Ergebnis haben.

Der Wundheilungsprozess der Haut

Der Begriff „Wundheilung“ beschreibt den allgemeinen Prozess, durch den Gewebe repariert wird. Es handelt sich um eine kontinuierliche Abfolge von Entzündung und Reparatur, bei der Epithel-, Endothel- und Entzündungszellen zusammen mit Blutplättchen und Fibroblasten außerhalb ihrer normalen Bereiche interagieren, um die übliche Struktur und Funktion des Gewebes wiederherzustellen.


Die drei Phasen der Wundheilung

Wenn die Haut verletzt wird – entweder versehentlich oder durch ein absichtliches Verfahren wie beim Microneedling – wird eine Kaskade von Heilungsphasen ausgelöst, um das verletzte Gewebe zu reparieren.

PHASE 1


Entzündung

Das Durchstechen der Haut regt das Immunsystem (bestehend aus weißen Blutkörperchen, den sog. Neutrophile und Makrophagen) an. Die Mikroverletzungen werden desinfiziert, abgestorbene Hautzellen entfernt und die Durchblutung gesteigert. Dadurch wird neues Gewebe gebildet.

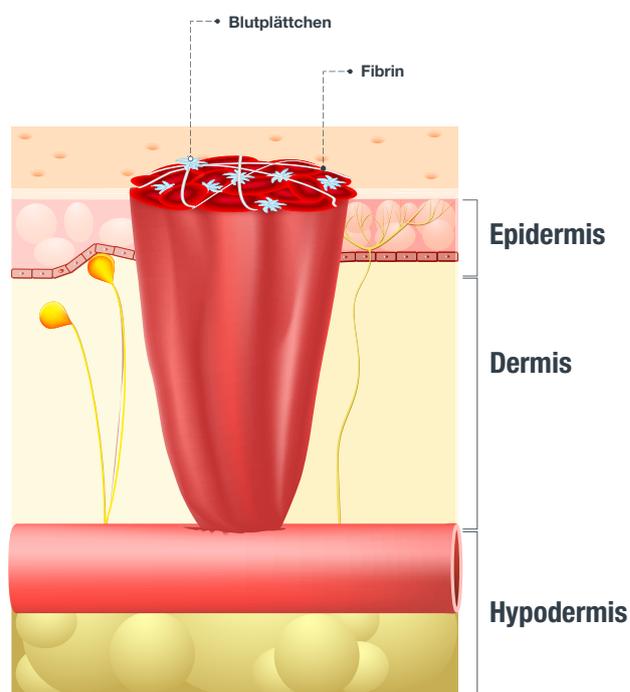


PHASE 2 Proliferation

In dieser Phase wird die ursprüngliche Gewebestruktur rekonstruiert, Makrophagen rekrutieren und stimulieren Fibroblasten zur Produktion von Kollagen 3 (der extrazellulären Matrix). Außerdem entwickelt sich ein neues Netz von Blutgefäßen.

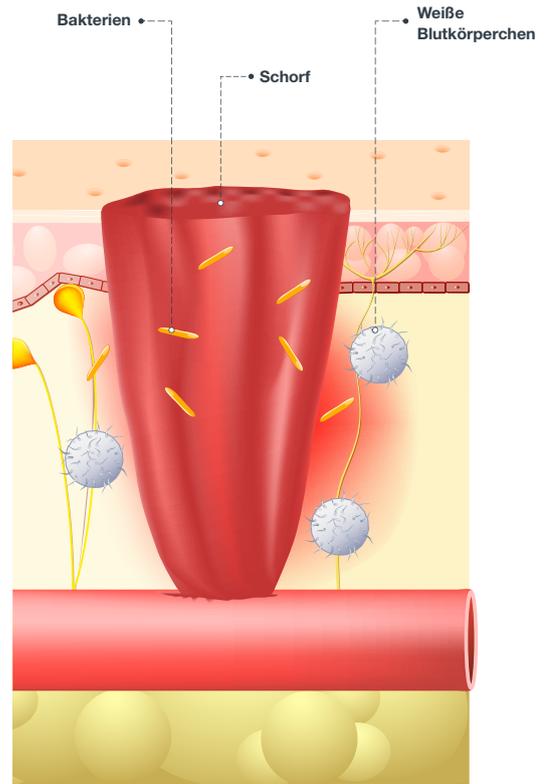

PHASE 3 Wiederaufbau

Die Wunde wird durch neues Hautgewebe und neue Blutgefäße ersetzt.

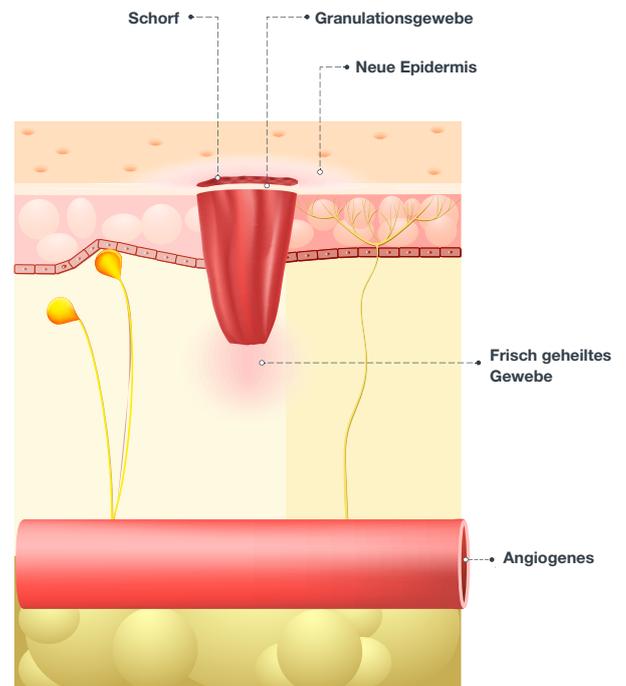


Was bewirkt Microneedling?

Dermalogica's Microneedling auf Medizin-Niveau verfolgt einen einzigartigen 3-Schritte-Ansatz, um jedem Kunden zu fortschrittlichen Ergebnissen zu verhelfen. Obwohl das Microneedling das Herzstück der Behandlung ist, so sind auch die Vorbereitung der Haut sowie die Erholungsphase wichtige und zu beachtende Punkte.

PHASE 1

Vorbereitung


- Peelen der Haut mit einem für das Hautbedürfnis spezifischen Pro Power Peel oder einem anderen Dermalogica Peeling.
- Hautentfettung

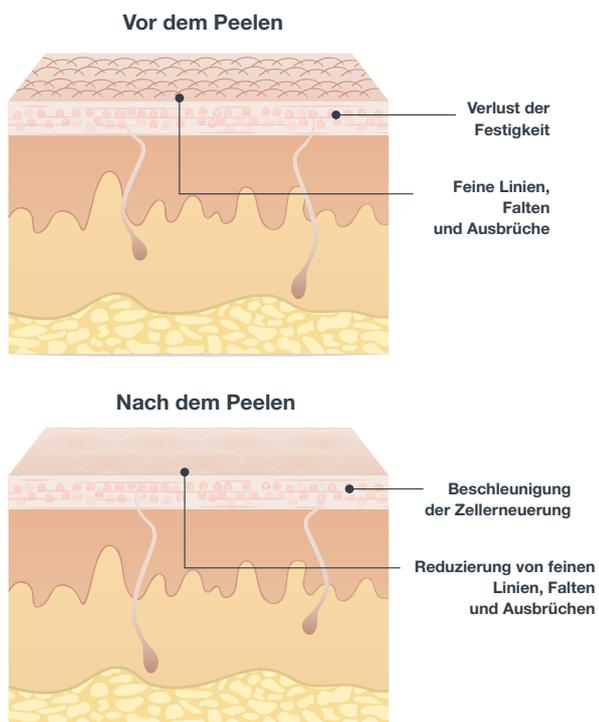

PHASE 2

Behandlung

- Microneedling
- Dermalogica Technik
- Professionelle Seren oder Pro Restore

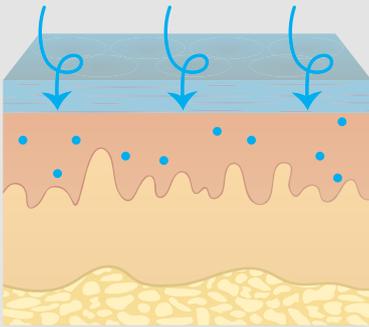

PHASE 3

Erholungsphase


- Erholung im Behandlungsraum
- After-Treatment Pflege
- Pflege für Zuhause



Professionelle Seren für gezielte Ergebnisse

Unser Microneedling-Behandlungsablauf ermöglicht eine maximale Anpassung an die spezifischen Hautbedürfnisse jedes einzelnen Kunden.

BEHANDLUNGSOPTIONEN

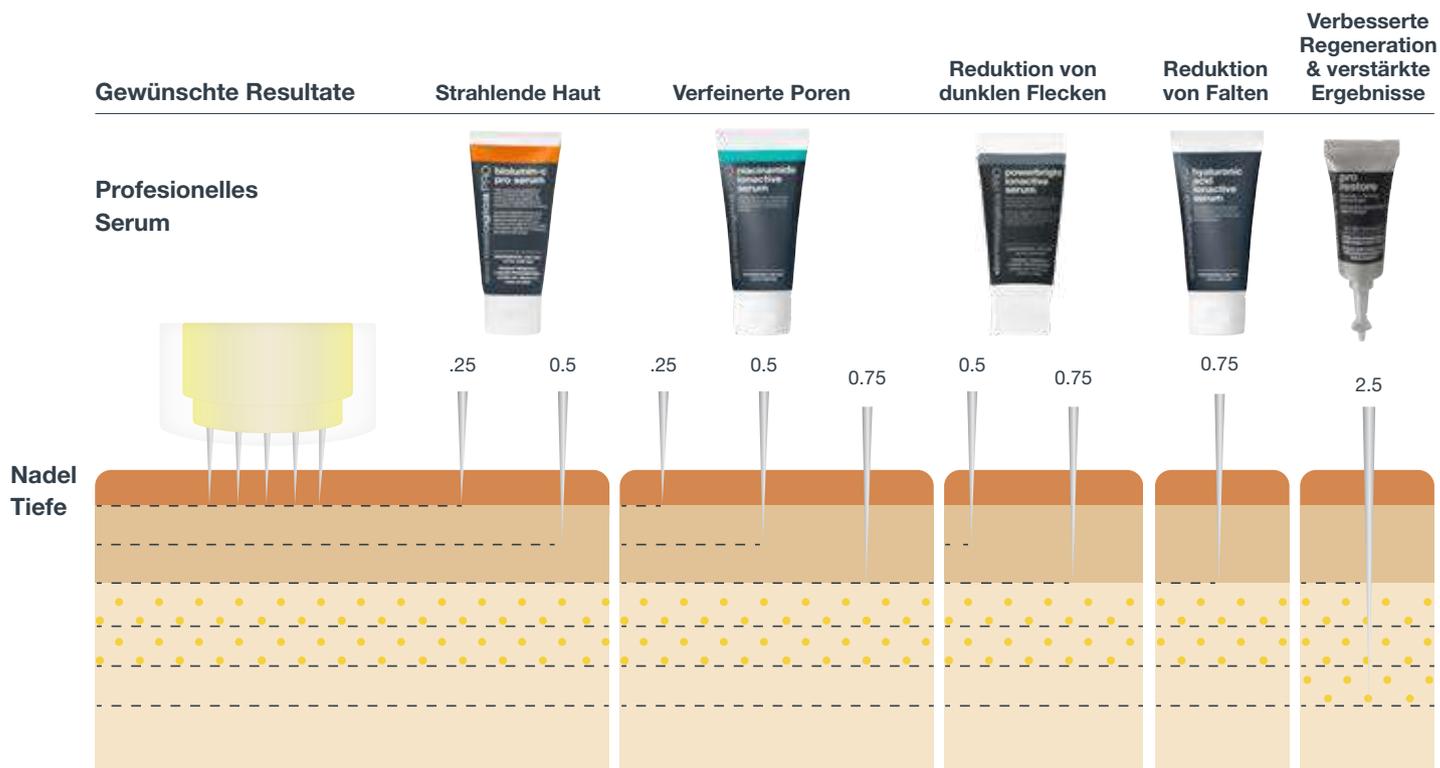

Professionelle Ergebnisse für jedes Hautbedürfnis

Microneedling ermöglicht es Ihnen, fortschrittliche Ergebnisse bei vier Hautbedürfnissen zu erzielen: fahle oder müde Haut, vergrößerte Poren, Hyperpigmentierung oder feine Linien und Falten. Folgen Sie dazu den individuell abgestimmten Behandlungs- und Pflegeplänen für zu Hause.

Für maximale Ergebnisse wird eine Microneedling-Kur mit vier Behandlungen im Abstand von jeweils vier Wochen empfohlen.

	Vorbereitung		Behandlung	Erholungsphase	
Hautbedürfnis	Doppelreinigung	Peeling*	Microneedling	Dermal layering	Pflege für Zuhause
Fahle / müde Haut					
Vergrößerte Poren					
Hyperpigmentierung					
Feine Linien und Falten					

* siehe Behandlungsprotokoll für weitere Peeling-Optionen

PRO restore

RECOVERY + FIRMING CONCENTRATE

Entwickelt für apparative Behandlungen
und chemische Peelings



-
- + Verringert Ausfallzeiten
 - + Verbessert Regeneration
 - + Verstärkt Ergebnisse
-



PRO restore




Wettbewerber

Ein einzigartiges Wirkungskonzept,


das auf den gesamten Zyklus der Mikroverletzungen einwirkt

STÄRKEN

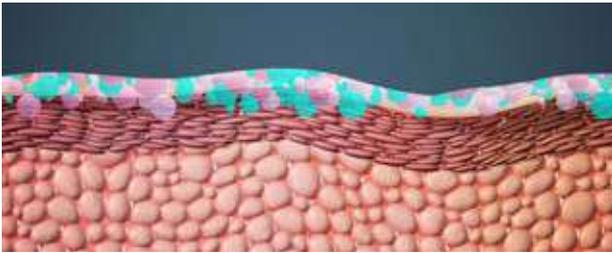


Beta-Glucan aus Hafer dringt in die Haut ein und beschleunigt die Migration von Keratinozyten für einen schnelleren Wundverschluss. Es bildet einen feuchtigkeitsspendenden Film, um die

WIEDERHERSTELLEN

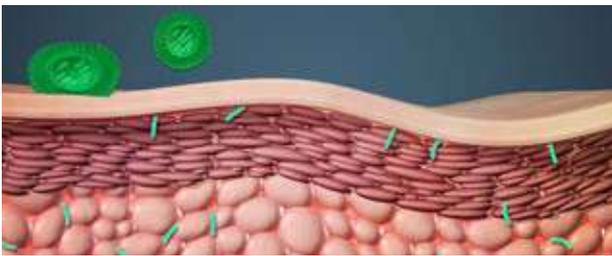

Omega-3 aus Algen ist reich an EPA und DHA (mehrfach ungesättigte Fettsäuren), die spezielle Pro-Resolving-Mediatoren (SPM) sind. Sie unterdrücken aktiv Entzündungen und fördern

VERBESSERN

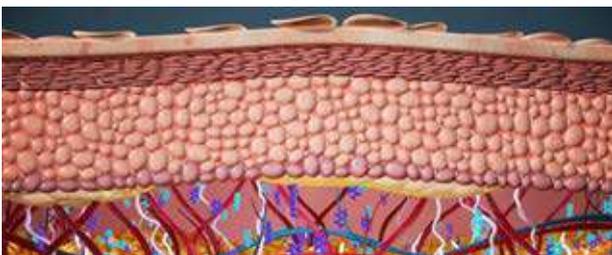

Oligopeptid-1 ist ein Peptid, das eine Signalkaskade aktiviert, die zur Proteinsynthese, zum Zellwachstum und Differenzierung führt, was die Produktion von Kollagen und Elastin für eine elastischere Haut bewirkt.

Hautbarriere zur Vorbereitung auf Behandlungen zu stärken.

Panthenol (Pro-Vitamin B5) ist ein starkes Feuchthaltemittel, das den Wassergehalt der Haut erhöht und die Feuchtigkeitsverdunstung verhindert. Dies führt zu einer stärkeren Hautbarriere.

Pilzextrakt (*Albatrellus confluens*) hilft, die Haut vor Hitzestress zu schützen, das Schmerzempfinden zu verringern und die Haut durch Hemmung des TRPV1-Rezeptors für das Schmerzempfinden zu beruhigen.

die Selbstheilung, indem sie körpereigene Heilungsprozesse auslösen, die dem Gewebe helfen, zur Homöostase zurückzukehren. Dies hilft, Entzündungen zu stoppen, bevor sie chronisch werden.

Bacillus Ferment trägt zur Aufrechterhaltung der bakteriellen Vielfalt bei und unterstützt das Mikrobiom und die Barriere der Haut.

Hyaluronsäure ist ein bekanntes Feuchthaltemittel, das Wasser anzieht und es in den oberen Hautschichten einschließt.

Phospholipide aus Oliven-Stammzellen stimulieren die Mitochondrien und die zelluläre Energieproduktion, um die Haut zu straffen.

Niacinamid, eine Form von Vitamin B3, hemmt die Übertragung von Melanin auf die Hautoberfläche und sorgt so für einen gleichmäßigeren Hautton.

Rosa Gallica hilft, die Pigmentierung auszugleichen und Feuchtigkeit zu spenden.

Dermalogicas professionelle Seren für das Microneedling: effektiv und sicher

Passen Sie Ihre Microneedling-Behandlungen an und erhöhen Sie deren Wirksamkeit durch Anwendung eines unserer professionellen Seren. Wählen Sie das Serum, das am besten zu den Hautbedürfnissen Ihrer Kunden passt.



biolumin-c pro serum

High-Performance Vitamin-C Serum mit innovativer Biotechnologie, das bis in tiefere Hautschichten eindringt

Vorteile

- Reduziert dunkle Pigmentflecken und das Erscheinungsbild feiner Linien und Fältchen
- Schützt vor freien Radikalen
- Ultra-stabile Formel
- 3x mehr Vitamin C im Behandlungsraum*

*Liefert 3x mehr Vitamin C als führende Mitbewerber

Hauptinhaltsstoffe

- **Vitamin-C-Komplex** mit zwei hochstabilen Formen von Vitamin C bekämpft oxidativen Stress und lässt die Haut strahlender und fester erscheinen.
- **Sophora Japonica Flower Extract** bietet antioxidative Vorteile.
- **Salvia Hispanica (Chia-Samen) Öl** ist reich an Antioxidantien, das freie Radikale bekämpft. Es enthält mehr als 60% Omega-3-Fettsäuren – eine der höchsten Konzentrationen aller pflanzlichen Quellen.



niacinamide ionactive serum

Klarendes Serum für unreine Haut

Vorteile

- Reguliert übermäßige Sebumproduktion und schützt vor zukünftigen Entzündungen
- Reduziert Rötungen, ohne die Haut auszutrocknen

Hauptinhaltsstoffe

- **Niacinamide**: eine aktive Form von Vitamin B3, die nachweislich dazu beiträgt, Ausbrüche zu beseitigen, Talg zu reduzieren und postinflammatorische Hyperpigmentierung (PIH) zu verringern.
- **Mikroverkapseltes Kalium-Azeloil-Diglycinat**: ein stabiles Derivat der Azelainsäure.
- **Kolloidales Silber**: ein Inhaltsstoff, der für seine Wirksamkeit gegen Cutibacterium Akne (C. Acnes) bekannt ist.



powerbright ionactive serum

Ein professionelles Serum mit hochwirksamen Wirkstoffen für hyperpigmentierte Haut

Vorteile

- Hilft, dunkle Pigmentflecken zu reduzieren
- Bringt die Haut zum Strahlen
- Gleicht den Hautton aus

Hauptinhaltsstoffe

- **Niacinamid und Hexylresorcinol** helfen, Pigmentflecken auszugleichen.
- **Diglycosylgallussäure** hilft, die Melanogenese zu kontrollieren, das Auftreten von dunklen Pigmentflecken zu reduzieren und Hautrötungen zu verhindern.
- **Oligopeptid-4** beruhigt die Haut und enthält Antioxidantien, die helfen, Pigmentflecken zu mildern und die Haut zum Strahlen bringen.
- **Magnesium Ascorbyl Phosphate (MAP)** – eine stabilisierte Form von Vitamin C, die den Hautton ausgleicht und die Haut mit antioxidativen Wirkstoffen versorgt.



hyaluronic acid ionactive serum

Feuchtigkeitsspendendes Serum für dehydrierte und/oder sensibilisierte Haut

Vorteile

- Schützt die Haut vor Austrocknung, indem es die Feuchtigkeit in der Haut einschließt
- Beruhigt empfindliche Haut und bewahrt die Barrierefunktion
- Stellt den Feuchtigkeitszyklus wieder her
- Macht das Hautbild glatter und gleichmäßiger

Hauptinhaltsstoffe

- **Hyaluronsäure** versorgt die Haut mit Feuchtigkeit.
- **Mikroverkapseltes Na2Acetyl Glucosamin Phosphat** hilft, die Hyaluronsäure in der Haut zu halten.
- **Pseudoalteromonas-Fermentextrakt, Alanin, Prolin** und **Serin** stellen die Hautfeuchtigkeit wieder her und helfen, die Barrierefunktion zu erhalten.
- **Alisma Plantago Aquatica Extrakt** spendet Feuchtigkeit und beruhigt die Haut.



dermalux

pro restore

2.1 OZ (59.4 mL) C.
100% PURE
100% VEGAN
100% CRUELTY FREE
100% PARABEN FREE
100% SULFATE FREE

Dermalogica Microneedling Behandlungsprotokoll

Doppelreinigung

1. Beginnen Sie die Doppelreinigung mit der Anwendung von **PreCleanse**.
 2. Führen Sie das Face Mapping durch.
 3. Für die zweite Reinigung **Special Cleansing Gel** auftragen.
-

Erneuerung

1. **One Step Prep** anwenden.
 2. Spezifisches **Pro Power Peel** auftragen (1–2 Schichten).
 3. Tragen Sie die Neutralisation nach dem Pro Power Peel auf.
 - Fahle Haut / Hyperpigmentierung: **UltraBright Peel**
 - Feine Linien und Falten: **Advanced Renewal Peel**
 - Porenverfeinerung: **Power Clear Peel**
- Power Down:** Verwenden Sie **Exfoliant Accelerator 35** oder ein anderes Dermalogica Peeling wie z.B. **Daily Microfoliant** anstelle des Pro Power Peels.
-

Optional: Betäubung

(gemäß den Richtlinien des Landes/Staates)

1. Tragen Sie die Betäubungscreme gemäß den Anweisungen des Herstellers und der empfohlenen Zeit auf.
 - Entfernen Sie die Betäubungscreme gemäß den Anweisungen des Herstellers. Verwenden Sie bei Bedarf ein spezielles Reinigungsgel.
-

Tiefenbehandlung mit Microneedling

1. Eine dünne Schicht **Ion Active** oder **Pro Restore** auf das gesamte Gesicht auftragen. Ein paar Minuten einziehen lassen.

2. Tragen Sie **Ion Active** oder **Pro Restore** auf den ersten Bereich auf und führen Sie die Dermalogica Microneedling-Technik durch. Wiederholen Sie diese Methode für die folgenden Bereiche.
 - Wählen Sie die Nadeltiefe und das Serum je nach Hautbedürfnis.
 - Pro Restore kann mit längeren Nadeln wie z. B. 1 mm oder 1,25 mm verwendet werden.
 - Entfernen Sie anschließend den Überschuss an Ion Active / Pro Restore mit einer feuchten Kompresse.
-

Optional: Maske

1. Eine weitere Schicht **Ion Active / Pro Restore** auf das gesamte Gesicht auftragen.
 2. **Clinical Oatmeal Masque** oder **Conductive Masque Base** auftragen und anschließend **Cooling Contour Masque** anwenden.
-

Dermal Layering

1. **Toner**
 2. **Pro Restore** oder **Ion Active**
 3. **Invisible Physical Defense SPF30**
-

After Care

1. Der Kunde erhält bei einem Microneedling mit Pro Restore zwei Tuben / bei einem Microneedling mit Ion Active das After Care Kit für die Nachbehandlung mit nach Hause.
 2. Geben Sie dem Kunden zusätzliche Anweisungen für die Pflege zu Hause und das empfohlene Behandlungsprogramm mit.
- Hinweis:** Pro Restore sollte am Abend nach der Behandlung angewendet werden und danach 7 Tage lang morgens und abends aufgetragen werden.



Mehr Umsatz durch Microneedling auf Medizin-Niveau Kalkulation

	Behandlungspreis (179 €) ohne MwSt	VK Preis Produkte ohne MwSt	Lohnkosten* inklusive Lohnnebenkosten	Produkt- einsatz pro Behandlung	Gemein- kosten	EK Preis Produkte ohne MwSt	Gewinn
Microneedling	145 €	-	25 €	10 €	30 €	-	80 €
Microneedling 1 Behandlung 3 Tuben Pro Restore	145 €	49 €	25 €	10 €	30 €	28 €	101 €
Microneedling Kur 4 Behandlungen 12 Tuben Pro Restore	580 €	196 €	100 €	40 €	120 €	112 €	404 €

* Lohn- und Gemeinkosten können variieren

dermalogica PRO

Dermalogica GmbH
Wiesenstraße 21
40549 Düsseldorf
Fon: 0211 55 04 65 - 0

<https://pro.dermalogica.de>

 @dermalogica_deutschland

 dermalogica.deutschland

